

Technovit®-2-Bond nové dvousložkové lepidlo na paznehty

Obj. č: 4160

kompletní sada bez dávkovací pistole (lepidlo 160 mm, 10 x směšovací nástavec, 10 x dřevěná podložka)



- vytvrdnutí za 30 vteřin
- plné zatížení za 3 minuty
- vysoká pevnost spojení pro dřevěné a gumové podložky paznehtu
- jednoduché použití, bez ručního míchání

Upozornění: Pro budoucí použití uschovejte!

Dodržujte bezpečnostní pokyny!

(povinné části, vyhlasky, atd..)

Technovit-2-Bond je speciálně vyvinuté dvousložkové lepidlo na polyuretanové bázi pro aplikaci podložky při léčbě onemocnění paznehtů skotu. Pomocí tohoto lepidla je dřevěná podložka přilepena na zdravý pazneht. Díky tomu je nemocná polovina paznehtu je odlehčena a urychluje se tak její hojení.

Vlastnosti:

- dvousložkové lepidlo Technovit-2-Bond nepotřebuje žádné předchozí míchání a může se přímo aplikovat na připravenou plochu paznehtu
- optimální gelová konzistence umožňuje dokonalé spojení paznehtu a dřevěné podložky
- díky krátké době aplikace (20-30 vteřin) a krátké době tvrdnutí (2-3 minuty) je proces aplikace zkrácen na minimum a snižuje stresování zvířete

Příprava paznehtu

Zdravý pazneht je třeba připravit tak, aby na něm vznikla rovná plocha, zbavená zbytků nečistot a rohoviny. Pro optimální pevnost je důležité zbavit styčnou plochu prachu a nečistot. K tomu použijte alkohol nebo jiné odmašťovadlo. Plochu paznehtu osušte horkovzdušnou pistolí. Dobře připravená plocha je předpokladem pro pevné spojení paznehtu s dřevěnou podložkou.

Příprava lepidla

Pootočte krytkou koncovky a sejměte ji. Na koncovku nasadte směšovací nástavec a pootočením jej zajistěte.


Náplň vložte do aplikační pistole, pistoli držte svisle a stlačováním pákového mechanismu tlačte tekutinu z náplně přes směšovací nástavec a až dojde k vypuzení vzduchu ze směšovacího nástavce.

První směs dejte stranou, dokud se na konci nástavce neobjeví optimálně smíchaná směs. Po ukončení aplikace smíchané lepidlo v nástavci ztvrdne, před další aplikací musíte použít nový nástavec.

Aplikace lepidla

Lepidlo naneste na střed dřevěné podložky a na zdravý pazneht tak, aby okrajové měkké a citlivé části paznehtu byly volné.

Přiložte podložku na pazneht a 10 – 20 sekund přidržujte. Vrstva lepidla mezi paznehtem a podložkou má být asi 5 mm. Pro stlačení použijte přiměřenou sílu tak, aby vrstva lepidla nebyla příliš slabá. Po - 3 minutách (při 20°C) je lepidlo vytvrzené a pazneht může být znovu zatížen. Po ukončení hojení druhého

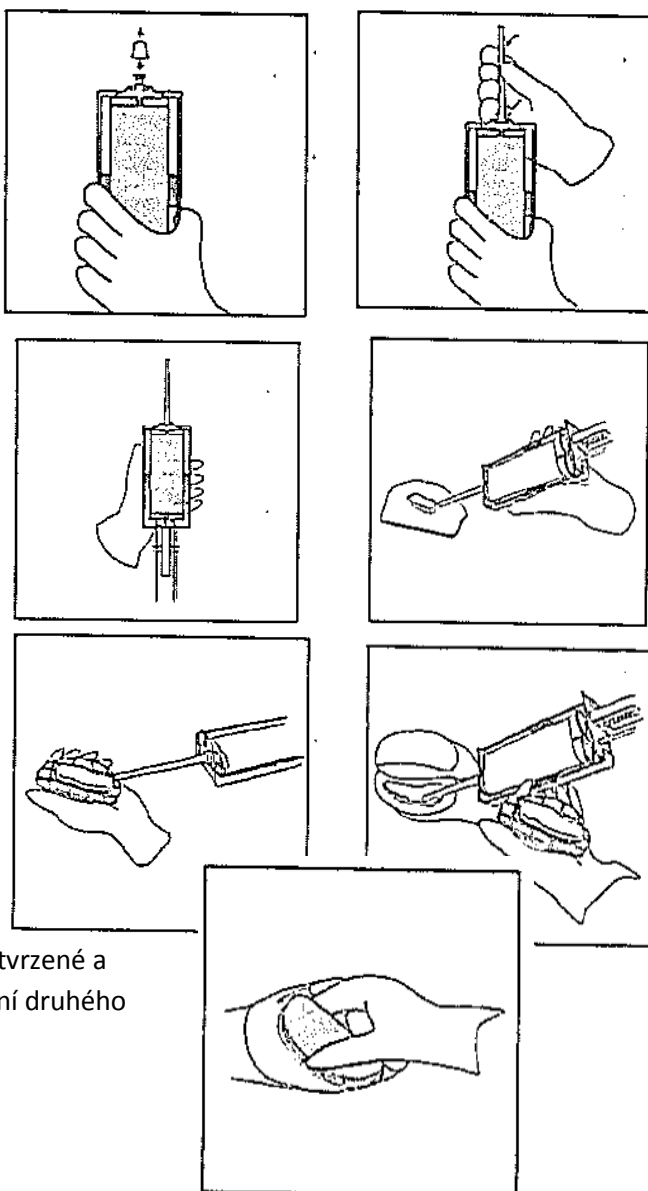


paznehtu podložku z paznehtu odstraňte za použití vhodného nářadí –(kleště, utínka)

Důležité upozornění:

Lepidlo správně funguje při optimální teplotě mezi 20 a 25°C. Při nižší teplotě se doba pro vytvrzení lepidla prodlužuje. Při nižší okolní teplotě lze lepidlo ohřát například ve vodní lázni, pazneht a dřevěnou podložku můžete přiměřeně ohřát pomocí horkovzdušné pistole. Se stoupající teplotou se zkracuje čas vytvrzení lepidla.

Bezpečnostní upozornění:

Výrobek používejte jen v dobře větrané místnosti. Nevdechujte výpary. Skladujte mimo dosah dětí . Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Používejte odpovídající ochranné prostředky (brýle, rukavice). Při zasažení očí okamžitě oči vymýt čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření. Při zasažení kůže důkladně omýt velkým množstvím vody. Při nevolnosti okamžitě vyhledat lékaře a pokud možno, vzít sebou obal s popisem výrobku.

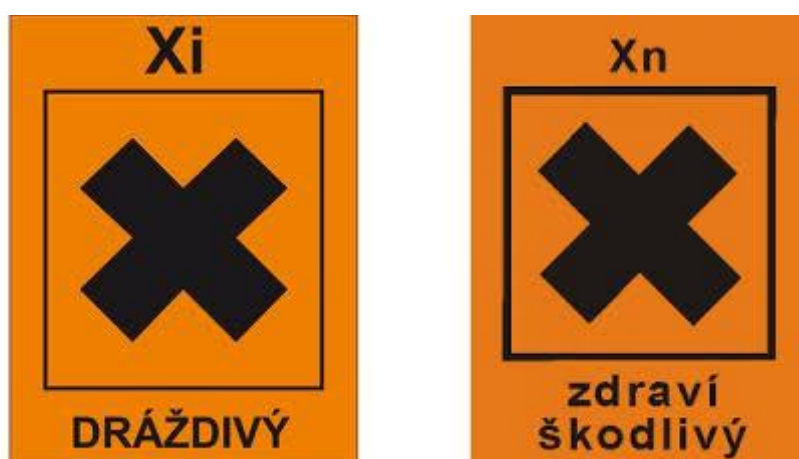

- R 20** Zdraví škodlivý při vdechování
- R 36/37/38** Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
- R 42/43** Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží možná.
- S 51** Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- S 23.2** Nevdechujte páry.
- S 22** Nevdechujte prach
- S 24/25** Zamezte styku s kůží a očima.
- S 37** Používejte vhodné ochranné rukavice
- S 26** Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- S 28** Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
- S 45** V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
- S 46** Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Objednací čísla:

- 4160 Technovit®-2-Bond, kompletní sada bez pistole
- 4161 Technovit®-2-Bond, náhradní náplň 160 ml
- 4162 Dávkovací pistole pro Technovit®-2-Bond
- 4163 Nástavec směšovací pro Technovit®-2-Bond, 10 ks
- 4164 Podložka paznehtní dřevěná, 112 mm
- 4165 Podložka paznehtní dřevěná, 130 mm



4161



4164,4165

4162



4163

Likvidace:

Po uplynutí životnosti, nebo v okamžiku, kdy další opravy jsou neekonomické, likvidují se části po celkové demontáži s ohledem na dodržení předpisů pro ochranu životního prostředí.

Kovové části se roztřídí podle druhů kovů a nabídnou se k odprodeji organizaci zabývající se sběrem druhotných surovin.

Části z umělých hmot a ostatních materiálů, které nepodléhají přirozenému rozkladu se roztřídí a odevzdají organizaci zabývající se sběrem těchto materiálů.

KAMÍR & Co.
VŠE PRO FARMU

KAMÍR a Co. Spol. s r.o., Fred. Pakosty 1148, 395 01 Pacov
e-mail: Info@kamir.cz, www.kamir.cz
tel: +420 602 150 271